

再使用禁止

CVNバンデージ

【警告】

1. 救急救命の訓練を受けた上で使用すること
2. 血液、体液で汚染された場合は廃棄すること
[交差感染の可能性がある]
3. 内包装に破損がある場合は使用しないこと [滅菌状態が保持できず、感染のリスクがあるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

*【形状・構造及び原理】

1. 外観図

1.1 外装



代表的写真 4インチ トラウマバンデージ
(旧パッケージ版)



代表的写真 4インチ トラウマバンデージ
(新パッケージ版)



代表的写真 4インチ ファーストエイドバンデージ

本品は、傷や汚損から内容物を保護する目的の外包装と、滅菌済みの伸縮包帯が圧縮状態で入っている内包装の、二重包装になっている。

旧パッケージは黄色、新パッケージは黒色主体の外装になっている。旧パッケージと新パッケージは、外装と有効期間が異なるのみで、本体形状に変化はない。

ファーストエイドバンデージは白色主体の外装となっており、有効期限は新パッケージと同様だが、製品仕様が異なっている。詳細は3.寸法・仕様の項目で記載する。

1.2 本体

1.2.1 旧パッケージ、新パッケージ



1.2.2 ファーストエイドバンデージ



1.3 各部位の説明

番号	名称	機能または動作
①	伸縮包帯	伸縮する素材で構成されており、創傷部位に圧迫を加えながら巻き付ける
②	パッド	創傷部位の保護のためのパッドで、創傷部位に当てて使用する
③	ハンドルループ	本品を創傷部位に適用する際に、この部位を手で持って固定する
④	プレッシャーバー	この部位に伸縮包帯を通し、折り返すことで創傷部位に圧迫を加える
⑤	クロージャーバー	本品を巻き終えた後に末端で固定するために使用する
⑥	プレッシャーパッド	棒状に巻かれたガーゼで、そのまま使用して圧力を加えることも、取り出してドレッシング材としても使用できる
⑦	ベルクロ	簡易的なクロージャーバーとして使用する

2. 原材料

番号	名称	原材料
①	伸縮包帯	旧パッケージ、新パッケージ コットン、ポリアミド繊維、 ポリウレタン ファーストエイドバンデージ ゴム、ポリエステル、コットン
②	パッド	フラッフバルブ
③	ハンドルループ	旧パッケージ、新パッケージ コットン、ポリアミド繊維、 ポリウレタン ファーストエイドバンデージ ゴム、ポリエステル、コットン
④	プレッシャーバー	ナイロン樹脂
⑤	クロージャーバー	ポリカーボネート
⑥	プレッシャーパッド	コットン
⑦	ベルクロ	ポリエステル、ナイロン

3. 寸法・仕様

3.1 寸法

種類	サイズ (cm)	パッド (cm)	外装込重量(g)
4インチ レスポンスバンデージ	10 x 480	10 x 20	80
4インチ タクティカルレスポンスバンデージ	10 x 480	10 x 20 (2枚入)	100
4インチ トラウマバンデージ	10 x 480	10 x 20	70
6インチ レスポンスバンデージ	15 x 480	15 x 20	110
8インチ アブドミナルバンデージ	20 x 480	50 x 50	220
8インチ アブドミナルバンデージ プレッシャーバー付き	20 x 480	30 x 25	135
4インチ ファーストエイドバンデージ	10 x 480	10 x 20	70
6インチ ファーストエイドバンデージ	15 x 480	15 x 20	110

3.2 付属品

- 4インチ トラウマバンデージ、8インチ アブドミナルバンデージには、プレッシャーバーが付属しない。
- 4インチ タクティカルレスポンスバンデージは、本体縫い付けのパッドに、追加パッドが1枚付属する。その他に、プラスチックラップ(42 x 42 cm)、ガーゼ(10 x 75 cm)が付属する。
- 8インチ アブドミナルバンデージには、プラスチックラップ(60 x 60 cm)が付属する。
- 4インチと6インチのファーストエイドバンデージにはプレッシャーバーとクロージャーバーが付属しない。プレッシャーバーの代わりに、パッドの裏に棒状に巻かれたガーゼが備え付けられており、そのまま使用して圧迫を加えることも、取り出して追加のドレッシング材としても使用できる。また、クロージャーバーの代わりにベルクロが備え付けられており、これを使用して末端を固定する。

4. 原理

出血部分をパッドで覆い、圧力をかけて包帯を巻くことにより、損傷部位を保護し止血を促す。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用する。

* 【使用方法】

- (1) 外包装を開封し、内包装から本品を取り出す。
この時、内包装に破損がないか確認する。破損があった場合、感染のリスクがあるため使用しないこと。
- (2) ハンドルループを手を持ち、プレッシャーバーが創傷部位の上に来るようにパッドを当て、圧迫を加えながら伸縮包帯を巻いていく。プレッシャーバーがない種類の場合は、創傷部位が保護できる位置にパッドを当て、伸縮包帯を巻いていく。
- (3) 一巻したあと、プレッシャーバーに伸縮包帯を通し、圧迫を加えながら反対方向に巻き戻す。プレッシャーバーがない種類の場合は、そのまま圧迫を加えながら巻いていく。
- (4) パッドの端が隠れるようにしっかりと巻いていく。
- (5) 末端まで巻き終えたら、クロージャーバーの両端を伸縮包帯の端に引っ掛けるようにして固定する。ファーストエイドバンデージの場合は、ベルクロを使用して固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- (2) 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期間

- 旧パッケージ版
8年（ガンマ線滅菌 外装に記載）
- 新パッケージ版、ファーストエイドバンデージ
10年（ガンマ線滅菌 外装に記載）

【保守・点検に係る事項】

内包装に破損がある場合は使用しないこと。

（滅菌状態が保持できず、感染のリスクがあるため）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20
光正第2ビル301
電 話：045-470-9041（代）
F A X：045-470-9043

2. 製造業者

Anji Hengfeng(中華人民共和国)