

医療用品 04 整形用品
 一般的名称 救急絆創膏 34864000
フォックスチェストシール

再使用禁止

【警告】

- 救急救命の訓練を受けた上で使用すること[不適切な使用や創傷の悪化を引き起こす可能性がある]
- 血液体液で汚染された場合は廃棄すること [交差感染の可能性がある]
- 包装に異常がある場合は使用しないこと [滅菌状態が保持できず感染の可能性がある]
- 弁や孔を塞がないように注意すること [空気の排出が行われない可能性がある]

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理】

1. 外観

1.1. 弁付き



1.2. 弁無し



2. 寸法

型式	パッケージサイズ(cm)	本体サイズ(cm)
弁付き	16 x 16 x 0.3	13.3 x 13 x 0.1
弁無し	16 x 16 x 0.3	13.3 x 13 x 0.1

3. 原材料

部位	材質
一方弁	ポリエチレン樹脂
台座、弁無し	ポリエチレン樹脂

4. 枚数

型式	1包装あたりの入数(枚)
弁付き	1
弁無し	2

5. 原理

本品は、緊張性気胸防止のために胸部に貼り付けて使用する。穿通創が考えられる場合でも、一方弁により空気の排出ができ、外気の流入を防ぐ。

【使用目的又は効果】

身体の部位に用いる、接着剤を付した、布製、プラスチック製等の絆創膏を言う。パッドを付する場合もある。傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法】

- 創傷の周りの皮膚から汚れや液体を拭き取る。
- パッケージを開封し、本品を取り出す。
- タブをつかみ、透明なライナーを剥がして接着面を露出させる。
- 接着面を下にして、傷の中央に貼り付ける。
- 傷病者の評価を継続し、本品の動作を監視する。
- 必要な場合はタブを使用して空気を排出し、再度密閉する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 負傷者に緊張性気胸の症状が現れた場合、本品を通して脱気針を挿入しないこと。
- 本品の通気が妨げられるような状態にはしないこと。
- 機能を損なう可能性があるため、本品を突起物の上に置かないこと。
- その他の注意事項は警告、禁忌・禁止の項を参照すること。

2. 不具合・有害事象

発生のある可能性がある不具合を以下に示すが、これに限られるものではない。

➤ 不具合

弁の動作不良

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

2. 有効期限

ガンマ線滅菌 製造後 5 年（外装に記載）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目 14 番地 20

光正第 2 ビル 301

電 話：045-470-9041（代）

F A X：045-470-9043

2. 製造業者

MedTrade Products Limited.（英国）