

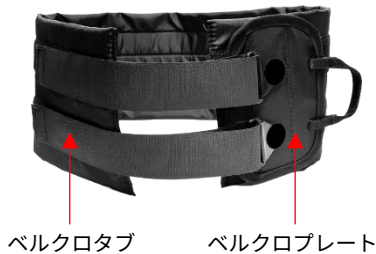
医療用品 05 副木  
一般的名称 成形型副木 36204000  
**骨盤固定スリング**

**【警告】**

- 血液、体液で汚染された場合は廃棄すること  
[交差感染の可能性がある]

**【禁忌・禁止】**

- 製品を改造・分解しないこと[本品の原理に記載された機構が動作しなくなる可能性がある]
- 使用目的以外は使用しないこと

**【形状・構造及び原理】****1. 外観****2. 寸法**

パッケージ寸法	: 20 x 20 x 5 cm
製品全長	: 147 x 20 cm
ベルクロプレート	: 10 x 15 cm
重量	: 約 340 g

**3. 原材料**

1000D コーデュラ、ミルスペックベルクロ、  
2 インチナイロン

**4. 原理**

骨盤骨折等の損傷を受けた場合に、損傷部分を固定する。

**【使用方法】****1. 使用前の注意**

- 使用する前に患者の衣服のポケットから物を取り除くこと
- 使用中は患者の皮膚に圧力による損傷がないか監視すること

**2. 使用方法**

- 本品を広げ、患者の骨盤部分が、本品の上にくるように設置する。
- 本体及びベルクロプレートで、骨盤周囲を固定する。
- 両方のベルクロタブ引っ張って、骨盤を縮小させる。  
この時、きつく巻きすぎないこと。

- 患者を搬送する。
- スリングは医師の指示の下で外す。

**【使用目的】**

損傷した身体部位を固定するために用いる。

**【使用上の注意】****1. 重要な基本的注意**

最大 48 時間以上使用しないこと。

**2. 不具合・有害事象**

発生の可能性があり、治療が必要とされる不具合および有害事象を以下に示すが、これに限られるものではない。

**➤ 不具合**

不適切な使用による器具の動作不良、破損

**➤ 有害事象****[装着中]**

圧迫に伴う疼痛、末梢部の阻血

**【保管方法及び有効期間等】****1. 保管方法**

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

**2. 有効期間**

本品に有効期間の表記はないが、保管方法の項に記載されている条件で適切に保管し、定期的に状態を確認すること。  
劣化が確認できた場合は、廃棄すること。

**【保守・点検に係る事項】**

- 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- 長期保管する場合は、器具に劣化がないか、機能に問題がないか定期的に確認すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】****1. 製造販売業者**

株式会社オーストリッチインターナショナル  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20  
光正第2ビル301  
電話：045-470-9041（代）  
FAX：045-470-9043

**2. 製造業者**

FareTec Inc.（アメリカ合衆国）