

医療用品 05 副木  
一般的名称 成形型副木 36204000

## 骨盤固定スリング

### 【警告】

- 血液、体液で汚染された場合は廃棄すること  
[交差感染の可能性ある]


### 【禁忌・禁止】

- 製品を改造・分解しないこと[本品の原理に記載された機構が動作しなくなる可能性がある]
- 使用目的以外は使用しないこと

### \*【形状・構造及び原理】

#### 1. 外観

旧パッケージ

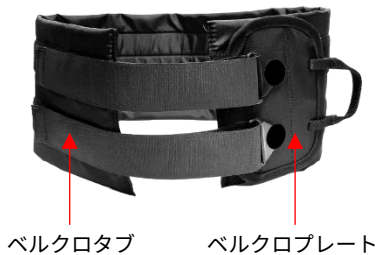

ベルクロタブ      ベルクロプレート

新パッケージ



ベルクロタブ      ベルクロプレート

新旧の違い:ベルクロタブとベルクロプレートとの接合方法がボタンから縫合へ変更されている。

#### 2. 寸法

(旧パッケージ)

パッケージ寸法 : 20 x 20 x 5 cm  
製品全長 : 147 x 20 cm  
ベルクロプレート : 10 x 15 cm  
重量 : 約 340 g

(新パッケージ)

パッケージ寸法 : 20 x 23 x 4 cm  
製品全長 : 134 x 20 cm  
ベルクロプレート : 10 x 15 cm  
重量 : 約 450 g  
カラー : ブラック、ブルー

#### 3. 原材料

1000D コーデュラ、ミルスベックベルクロ、  
2インチナイロン

#### 4. 原理

骨盤骨折等の損傷を受けた場合に、損傷部分を固定する。

### 【使用方法】

#### 1. 使用前の注意

- 使用する前に患者の衣服のポケットから物を取り除くこと
- 使用中は患者の皮膚に圧力による損傷がないか監視すること

#### 2. 使用方法

- 本品を広げ、患者の骨盤部分が、本品の上にくるように設置する。
- 本体及びベルクロプレートで、骨盤周囲を固定する。
- 両方のベルクロタブ引っ張って、骨盤を縮小させる。  
この時、きつく巻きすぎないこと。
- 患者を搬送する。
- スリングは医師の指示の下で外す。

### 【使用目的】

損傷した身体部位を固定するために用いる。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

最大 48 時間以上使用しないこと。

#### 2. 不具合・有害事象

発生の可能性があり、治療が必要とされる不具合および有害事象を以下に示すが、これに限られるものではない。

##### ➤ 不具合

不適切な使用による器具の動作不良、破損

##### ➤ 有害事象

#### 【装着中】

圧迫に伴う疼痛、末梢部の阻血

## 【保管方法及び有効期間等】

### 1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

### 2. 有効期間

本品に有効期間の表記はないが、保管方法の項に記載されている条件で適切に保管し、定期的に状態を確認すること。劣化が確認できた場合は、廃棄すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- (1) 血液、体液等で汚損の場合は廃棄すること。
- (2) 長期保管する場合は、器具に劣化がないか、機能に問題がないか定期的に確認すること。

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

### 1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20  
光正第2ビル301  
電 話：045-470-9041（代）  
F A X：045-470-9043

### 2. 製造業者

FareTec Inc.（アメリカ合衆国）