

機械器具 01 手術台及び治療台
一般的名称 汎用手動式手術台 36867010

特定保守管理医療機器

スパインボード

【禁忌・禁止】

1. 本品を改造・分解しないこと
2. 担架と患者の合計重量が耐荷重を上回らないよう注意すること

【形状・構造及び原理】

1. 外観図



2. 寸法

32cm x 182cm x 40cm

【使用方法】

材質：高密度ポリエチレン

【使用方法】

1. 患者の怪我を正確に把握する。
2. 4本のベルトで固定する。
3. 製品の両端を持ち上げて、患者を移送する。

【使用目的又は効果】

本品は、手術が必要な部位の大部分に適応するように改良された完全移動型手術台（汎用）であり、治療台兼用移送車（救急処置台ストレッチャー）として使用することを目的とする。

【使用上の注意】

1. 血液、体液等で汚損の場合は、廃棄すること。
2. 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

破損がある場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル
〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20
光正第2ビル301

電話：045-470-9041（代）

FAX：045-470-9043

2. 製造業者

SHANGHAI EMSS MED&TECH CO., LTD(中華人民共和国)