

医療用品 05 副木
一般医療機器 真空成形型式副木 35358000

バキュームスプリント

【警告】

- 救急救命の専門家から訓練を受けた上で使用すること
- 血液体液で汚染された場合は廃棄すること

【禁忌・禁止】

- 製品を改造・分解しないこと

【形状・構造及び原理】

1. 外観図

セット内容



- ① バキュームスプリント（腕用）
- ② バキュームスプリント（脚用）
- ③ バキュームスプリント（関節用）
- ④ ハンドポンプ
- ⑤ 収納バッグ

2. 原材料

部位名	材質
スプリント本体	ポリエステル TPU
ポンプ	アルミニウム

3. 寸法

名称	サイズ(cm)	重量(kg)
腕用	67 x 50	0.7
脚用	100 x 70	1.5
関節	47 x 57	0.7

4. 原理

本品の上に受傷した身体部位を置き、ファステックスで部位に固定する。その後、付属のポンプで本品の空気を抜くことで、スプリント内のビーズ状のスチロールが内部空気を吸引し、各ビーズの間隔が狭くなり強固に固定される。弁を開放することにより元の状態に復元される。

【使用目的又は効果】

受傷した身体部分を固定するために用いる器具をいう。受傷した部位の周囲に設置して本品から空気を抜くことによって固定する。

【使用方法】

- (1) 3種類の中から部位に適したサイズを選択する。
- (2) スプリントの上に患部を乗せる。
- (3) スプリントを患部に巻き付け、バックルを閉じ、ストラップを締めて固定する。
- (4) スプリントの吸引バルブを右に回し、密閉状態にする。
- (5) 吸引バルブにハンドポンプの吸引ホースを取り付け、スプリントが固定されるまで空気を抜く。
- (6) 固定した後に緩める場合は、吸引バルブを左に回し空気を中に入れる。

【使用上の注意】

- (1) 使用部位に合わせたサイズを使用すること。
- (2) 鋭利・硬質なものを取り除いた上で使用すること。
- (3) 本品以外に固定が必要な場合は、専用の固定具を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 汚れ等が付着している場合は、中性洗剤等で拭き取ってから保管すること。
- (2) 減圧した状態で無理に折りたたまないこと。
- (3) 直射日光及び高温多湿をさけて、乾燥した状態で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 汚れ等を落とす際は水と中性洗剤を使用すること。また、バルブは必ず閉めて行うこと。
- (2) 消毒はアルコールベース（エタノール/プロパン）消毒剤のみを使用すること。他のものを使用した場合、表面や素材に回復不能な損傷を与える可能性がある。
- (3) 洗浄後は本品を十分乾燥させること。
- (4) 再使用の際は、損傷がないかどうか十分に確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20 光正第2ビル301
株式会社オーストリッチインターナショナル

電話：045-470-9041（代）

FAX：045-470-9043

製造業者

SHANGHAI EMSS MED&TECH CO., LTD

(中華人民共和国)