

医療用品 05 副木  
一般的名称 成形副木 35354000

再使用禁止

## ネックカラー

### 【警告】

- 血液や体液で汚染された場合は廃棄すること  
[交差感染の可能性がある]

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止[機能に不具合が発生する可能性がある]

### 【形状・構造及び原理】

#### 1. 外観図



イエロー



オリーブドラブ

#### 2. 寸法

##### (1) イエロー

横(mm)	縦(mm)	重量(g)
560	180	119

##### (2) オリーブドラブ

横(mm)	縦(mm)	重量(g)
570	180	127

ロックを解除して顎の部分を最大 45mm 伸長可能

#### 3. 原材料

本体 : プラスチック樹脂  
クッション材 : ウレタンフォーム

#### 4. 原理

本品は頸椎損傷を伴う患者や傷病者の頸部を固定し、保護するためのものである。

### 【使用目的又は効果】

頸椎損傷を負った傷病者に対し、負傷箇所を固定するために使用する。

### 【使用方法】

- 患者の怪我を正確に把握する。
- ロック装置を緩めて長さを患者に合わせる。
- ロック装置を固定する。
- 患者に装着し、ベルクロで固定する。

### 【使用上の注意】

- 血液、体液等で汚損の場合は、廃棄すること。
- 本体に悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

水濡れに注意して、直射日光及び高温多湿をさけて常温で保管すること。

#### 2. 有効期間

本品に有効期間の表記はないが、保管方法の項に記載されている条件で適切に保管し、定期的に状態を確認すること。劣化が確認できた場合は、廃棄すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 1. 製造販売業者

株式会社オーストリッチインターナショナル  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区一丁目14番地20  
光正第2ビル301  
電話：045-470-9041（代）  
FAX：045-470-9043

#### 2. 製造業者

SHANGHAI EMSS MED&TECH CO.,LTD(中華人民共和国)